

Viva-Jellwet(ビバ・ジェルエット)
E551



Viva-Luck Oral Care

保湿からはじまる口腔ケア

ビバ・ジェルエット

Viva-Jellwet



口腔ケア用に開発した湿潤ジェルです。

口腔環境を守り、口腔機能の向上に効果を発揮します。

不要な添加物を含まず、また無色透明・無味無臭ですので

安心・安全にお使い頂けます。

滑らかで塗布・回収に優れた水溶性ジェルです。

 **株式会社 東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

お口の保湿に！


ビバ・ジェルエット

Viva-Jellwet (ビバ・ジェルエット)

E551

http://jellwet.net ビバ・ジェルエット学術情報サイト

- 塗布・回収しやすい水溶性ジェル
介助による口腔ケアに操作性が良い粘度特性。
塗布が容易で溜まりにくく、除去回収も容易。
- 不要な添加物を含まない
ケアの前提条件、「常時保湿」に最適の性質。
必要な成分のみ、かつ安全性の確認されている
原材料だけという最新の材料設計理論を採用。
- 無味無臭
長時間利用も考慮、甘味料・香料は使用せず。
- 無色透明
塗布後の状況を観察しやすくするために無色。

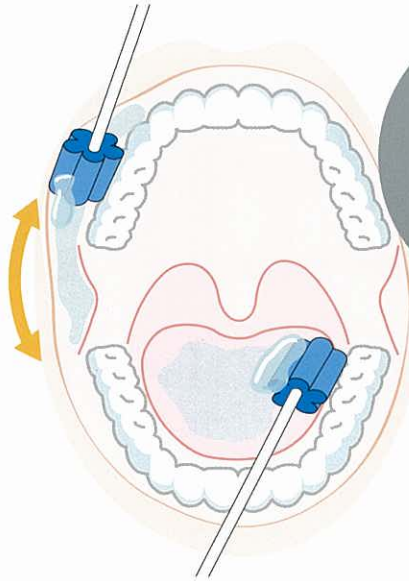


使用方法

スポンジブラシ(ビバくるりん)を
水に湿らせ、ビバ・ジェルエット適量
(1~2cm)を取り出し、
口腔粘膜全体に塗布します。
塗布後、拭き取るか吐き出して下さい。
ビバ・ジェルエットを少量づつ
使用するのがコツです!!


ビバ・ジェルエットは安全で、口腔ケアのトータル時間の短縮を可能にします。

ジェル状のビバ・ジェルエットは誤嚥を防ぎ安全にお使いいただけます。また、ビバブラックプラスとの併用で大幅なケア時間の短縮を実現します。

人工プラーク除去に要した時間

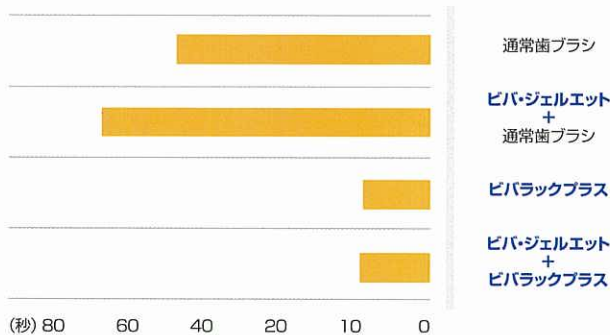

咽頭に落下させた水量

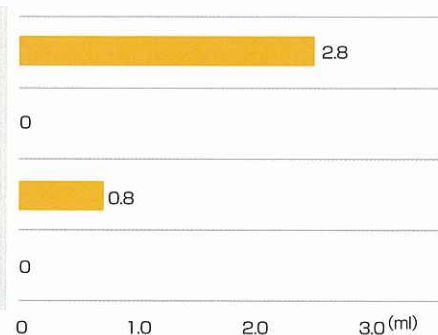

開発・実験データ：鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座

介護が必要な方を やさしくサポートします

ビバブラック・オーラルケア ラインナップ



Viva-Luck Oral Care



ビバ・ジェルエット

口腔ケア用潤滑ジェル

容量： 120g
成分： 水、グリセリン、アルギン酸Na、
ヒドロキシエチルセルロース、
セチルピリジニウムクロリド、
安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na
製品コード：E551



介護用口腔ケアシステム

ビバブラックプラス

注水・吸引機能が同時にできる歯ブラシです。(※)
簡単に安全に口腔ケアができます。
(※) 注水・吸引歯ブラシセット(別売)併用時
製品コード：E560



吸引機能付舌清掃用具

ビバゼットン

ビバブラックプラスに接続し、吸引しながら舌清掃を
行えます。歯科用ユニットに接続してもご使用頂けます。
製品コード：E547



口腔粘膜清掃用スポンジブラシ

ビバくるりん

ビバくるりんは口腔粘膜清掃用スポンジブラシです。
お薬の塗布やマッサージにもお使いいただけます。
製品コード：E546(30本入)
E549(300本入)

株式会社 東京技研

URL: http://www.tokyogiken.com e-mail: TG@tokyogiken.com

お問い合わせ

【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13

tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760

【仙台営業所】〒981-3133 仙台市泉区泉中央 4-28-2

tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653

【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市名東区香流 1-822

tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356

【大阪営業所】〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-6-19 イグナイト5

tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876

【福岡営業所】〒812-0042 福岡市博多区豊 1-8-21

tel. 092-411-0377 fax. 092-411-0376

【横浜工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-37

tel. 045-591-4441 fax. 045-591-4445

■性能向上のため、製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適用機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。



DIN EN ISO 9001:2000
ISO 13485:2003

07031056/3 Y